# MANUAL DE USO PLACA ACCUTREAT



### PASSO 1

Retire o pacote da geladeira, e separe as placas que serão utilizadas.



# PASSO 2

Coloque a placa 5 minutos na estufa para secar o excesso de umidade, auxiliando a semeadura.



#### PASSO 3

A placa Accutreat possui 4 seções com o mesmo ágar, trace uma linha em formato de cruz no fundo da placa com uma caneta permanente dividindo a placa toda em 8 partes. Vide abaixor



## PASSO 4

Determine a sequência de amostras de leite que serão trabalhadas e identifique cada uma no fundo da placa.



# PASSO 5

Agite a amostra, mergulhe o swab estéril no tubo e retire o excesso pressionando o swab no interior do tubo.











PASSO 6 PASSO 7 PASSO 8

Semeie o swab com a amostra em forma de estria na área delimitada Semear a placa apoiada na bancada. Tampe a placa e deixe 5 minutos sobre a bancada para absorção da amostra. Inverta a placa, com o fundo para cima e coloque a placa na estufa por 24 horas.





PASSO 10

PASSO 9

Após 24 horas, abra a placa de frente colónias na placa.

embre-se de sempre tilizar a régua enviada untamente ao material.



NNOVATE SCIENCE
Diagnósticos de Precisão

ACCUTREAT





